

Anleitung zum Histamintest

Analyse-Auftrag CH

Praxis/Stempel

Mitbringer/Lieferung
 Andreas Schuler
 Kreuzlingen
 IABC AG
 Esslenstrasse 3
 8280 Kreuzlingen
 Telefon (0)71 666 83 80
 www.iabc.ch

Patientendaten

Name* _____ Vorname* _____ Hauptberuf* _____
 Spital* _____ Lydenkennung* _____
 PLZ* _____ Ort* _____ E-Mail* _____ Gewicht* _____
 Telefon* _____
 Geburtsdatum* _____ Geschlecht* weiblich männlich sonst cm kg
 Bei Kindern wird zusätzliches Alter 18 Jahren bitte angeben (Stammf.)
 Einweisung* _____ cm **Blutabnahme mit der rechten Seite beschriftet**
 Selbstabgabe Arztbesuche Krankenkasse _____
 Beschreibung der Praxis* Beschreibung des Praktikums _____ Anlaufknoten* ja nein
 Thrombozytose Thrombozytopenie _____ Zyt der Blutmarrow _____
 Selbstübermittlungs* ja nein keine Wt _____
 Name* _____ Hiv _____

Kontrollieren Sie bitte zuerst, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind:

- Instruktion zur Befüllung des Probegefässes
- 1 Versandhülle weiss
- Transparentes Röhrchen mit blau-gelbem Verschluss zur Testabnahme
- 1 Analyse-Auftragsformular (ausgefüllt durch Ihren Arzt oder Therapeuten). Bitte füllen sie den Auftragsbogen komplett mit Ihren Stammdaten und mit Ihrer Unterschrift aus.
- 1 Rücksendecouvert IABC
- **Bitte das ausgefüllte Analyse-Auftragsformular beifügen!**

Haben Sie Fragen?
 Wir helfen Ihnen gerne weiter!

IABC AG
 Esslenstrasse 3
 8280 Kreuzlingen
 Schweiz

Telefon
 +41 (0)71 666 83 80


S559020 IABC Anleitung zum Histamintest ger. Vers. 02.09.2019



Röhrchen bitte beschriften.



Blauen Ring festhalten. Gelben Stick leicht drehen.

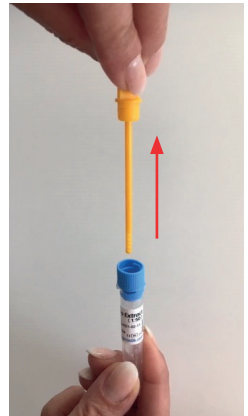

3x An verschiedenen Stellen.



Nur 1x Stuhl einfüllen. (Bis zu den Einkerbungen befüllen)



Blauen Ring festhalten. Drehen und nach unten drücken bis es **klickt**.

Bitte wenden

● Proberöhrchen in weisse Versandhülle stecken und in das Versandcouvert packen.

● Bitte senden Sie die Probe noch am gleichen Tag, samt Auftragsbogen, mit dem beiliegenden Couvert an uns. Bitte nicht am Freitag bzw. am Wochenende abschicken!

Sind Ihre Angaben komplett?

Bitte achten Sie darauf, dass der Analyse-Auftragsbogen komplett ausgefüllt ist:

- In der Kopfleiste bitte den Stempel des Einsenders
- Die vollständigen Patientendaten
- Die gewünschte Analyse ankreuzen
- Unterschrift des Patienten auf dem Auftragsbogen, denn sonst kann der Auftrag leider nicht ausgeführt werden.
- Die Proben mit vollständigem Namen und Geburtsdatum beschriften.

ACHTUNG!

Nicht beschriftete Proben werden vernichtet